

新製品 ゴールドマン グレーシーキュレット ミニ 7/8M 改良型 2 と シャープニングについて

製品の特長

この新型キュレットは、深くて狭い歯周ポケットへのアクセスに適しているだけでなく、健康で浅い歯肉溝のメンテナンスにも便利です。

従来のキュレットよりも幅が狭く、厚みも薄く、エッジの長さが短めにできています。

シャープニング

写真（図1）のように刃部、エッジのある方の第一シャンクを平坦に削ってありますので、その平面をガイドとして平坦な油砥石を手にとって当てるようにするだけの簡単な操作です。側面と背面を削ります。短期間ですべてのキュレットの研磨の技術が上達する形態を備えています。

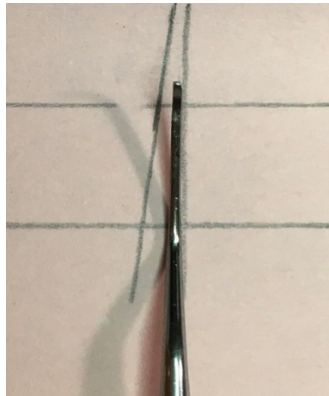


図1

そして、先端部の幅を先細り、厚みをバランスよく三日月のように削り、形を整えて最後にエッジをつけて研磨を仕上げるようにします。（図2）

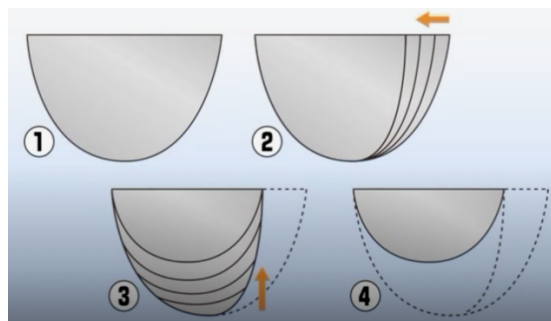


図2

エッジの磨耗が多くなるにつれて、平坦になったシャンクによる先細りのガイドが有効になっていきます。図3内の”Flat”は、“平坦な面”を意味しています。

この小さくなったキュレットの形をイメージしながら新品のキュレットを研磨していけば、使うたびにエッジがつけやすい形になっていきます。



図3

不十分なシャープニングで変形したキュレットもこのやり方で研いでいけば、よい形に修正でき、もっと長持ちします。11/12, 13/14などのキュレットも刃部は同じ形に仕上げていきます。

図4の2本並んでいるキュレットの左がゴールドマン社グレーシーキュレット7/8新品で、右側がわたしの手作りシャープニングのお手本です。第一シャンクを平坦に削ってあるのが特徴で、これが使い易くて治療効果のあるキュレットに生まれ変われる秘訣です。



図4

第1シャンクのエッジの側を平面に、先細りに削っていき、より使い易いキュレットとなり、歯肉縁下に入れても痛みがなく、ポケット底に取り残した歯石を難なく除去できます。

大半の症例で麻酔を必要としない施術、SRP、歯石除去、ルートプレーニング、PMTCが可能です。

30年の臨床で構築された
『90%日外科的歯周療法で成果をあげるインスツルメンテーションテクニック』



キュレットのシャープニングやSRPについて、さらに興味のある方はDVD「30年の臨床で構築された『90%日外科的歯周療法で成果をあげるインスツルメンテーションテクニック』」を購入してください。

◎商品情報



<https://www.oralcare.co.jp/product/3090.html>

◎DVD 購入の連絡先

フリーダイヤル 0120-500-418 (株式会社オーラルケア)

◎サンプル動画 (中山吉成先生 実践歯周病セミナー)



<https://sat-iso.net/wp/nakayama/>

★ゴールドマン グレーシーキュレット ミニ 7/8M 改良型2 製品情報

発売予定日:令和5年10月初旬

中山吉成 (米国シアトル在住・歯周病専門医)